



FFP2

FFP2

Mascarilla filtrante

Mascarilla de protección 94% filtración para la contaminación de partículas



Información técnica

Nombre de producto: Mascarilla de filtración

Clasificación: FFP2 (KN95)

Modelo: MSH


Tamaño: 15,7 x 10,7 cm

Estándar: EN 149:2001 + A1:2009, GB2626:2006

Composición: 66,7% Tela no tejida, 33,3% tela fundida por soplado

Aviso de alergia: Textil no tejido

Caducidad: Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

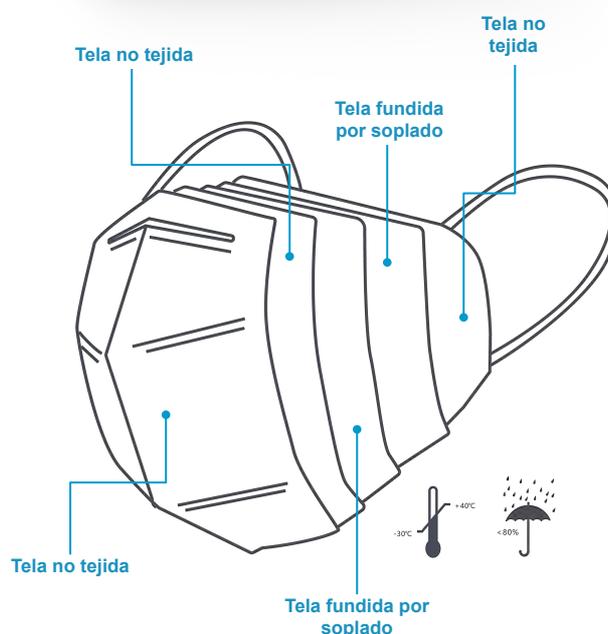

SKU: MASK ST-00011.0040

Instrucciones para ponerse la mascarilla

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



CE 2163

EN 149:2001 + A1:2009

FFP2

Mascarilla filtrante

Mascarilla de protección 94% filtración para la contaminación de partículas



Información importante

- Los equipos NR no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejadas de fuentes de calor.
- Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos.

Características del paquete

Cantidad: 40 uds(bolsas individuales)/paquete

SKU: MASK-ST-00011.0040

Dimensión: 141,5 x 225 x 131,2 mm

Características de la bolsa individual

Cantidad: 1 ud/bolsa

SKU: MASK-ST-00011.0001

Dimensión: 130 x 130 mm



Características de la caja

Cantidad: 12 paquetes/caja

Total cantidad: 480 unidades

Dimensión: 550 x 450 x 250 mm

CE 2163

EN 149:2001 + A1:2009